

Hofmag

DRUG FREE – NON INVASIVE

TECHNISCHE INFORMATION
UND
BETRIEBSANLEITUNG

HOFMEIR
MAGNETICS
LIMITED





BETRIEBSANLEITUNG

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR DEN HOFMAG

1. Den Hofmag mit dem mitgelieferten Netzkabel **2** anschließen und den Hauptschalter **1** betätigen.
2. Das Gerät piepst 3x und das Display **3** leuchtet auf, jetzt ist es betriebsbereit.
3. Das Hofmag kann frei oder im Karten-Modus betrieben werden. Wird nach einer Karte verlangt, die Karte bitte links am Display gemäß dem Pfeil (Logo nach oben) einstecken. **7**
4. Bei Kartennutzung wird Ihnen jetzt das verbleibende Guthaben auf dem Display angezeigt.
5. Eine Loop an der Buchse **8** am Hofmag einstecken.
6. Im Display können Sie die Restzeit und die Stärke der aktuellen Therapie sehen.
7. Mit den Tasten rechts (+) und links (-) **5** können Sie die Zeit erhöhen und verringern. Das Erhöhen der Zeit geht nur vor dem Start oder während einer Pause.
8. Mit den Pfeiltasten hoch und runter **6** können Sie die Stärke zwischen 1 (niedrig) und 13 (hoch) jederzeit einstellen.
9. Der große Start-Stop-Button in der Mitte startet die Therapie, ein erneutes Drücken stoppt die Therapie. Zum Zurücksetzen der Therapie halten Sie den Start-Stop-Button **4** mindestens 3 Sekunden gedrückt.
10. Mit Ablauf der Zeit endet die Therapie und zwei Piepstöne ertönen.
11. Nach Benutzung schalten Sie das Gerät am Hauptschalter **1** wieder ab. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.

GARANTIE

Der HOFMAG K8 hat eine 3 Jahre Garantie.

DAS HOFMAG GERÄT



- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Hauptschalter | 5. Zeit Plus/ Minus |
| 2. Netzanschluss | 6. Intensität hoch/ runter |
| 3. Display | 7. Kartenschlitz |
| 4. Start-/ Stopknopf | 8. Buchse Loop |

Zur Reinigung des äußeren Gehäuses und der Schlaufe lauwarmes Wasser mit mildem Haushaltsreiniger verwenden. KEINE ANDEREN REINIGUNGSMITTEL VERWENDEN!

Achtung! Vor jeder Reinigung ist der Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen!

GEGENANZEIGEN FÜR DEN BEDIENER:

VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN SIE SCHWANGER SIND ODER GLAUBEN, DASS SIE SCHWANGER SEIN KÖNNTEN.

VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN SIE EINEN HERZSCHRITTMACHER, EINE INSULINPUMPE ODER ANDERE ELEKTRONISCHE IMPLANTATE WIE PERMANENTE HÖRHILFEN ODER METALLIMPLANTATE WIE DRÄHTE UND METALLSTENTS HABEN.

GEGENANZEIGEN FÜR PATIENTEN:

NICHT BEI SCHWANGEREN TIEREN ODER DIREKT AUF METALLIMPLANTATEN ANWENDEN.

STELLEN SIE SICHER, dass die Behandlungsschleufe, das Netzkabel und der Stecker intakt sind. Kontrollieren Sie die Spule vor dem Gebrauch, um sicherzustellen, dass die Isolierung nicht zerrissen, beschädigt oder durchtrennt ist, sodass das Kabel im Inneren frei liegt.

STELLEN SIE SICHER, dass das Gerät auf einer geeigneten, trockenen, ebenen und stabilen Oberfläche platziert wird und dass die Behandlungsschleufe nicht übermäßig verlängert ist.

NICHT das Gerät fallenlassen. Das Gehäuse ist zwar haltbar, bedenken Sie jedoch, dass es hauptsächlich einen äußeren Schutz für die empfindliche Elektronik im Inneren bietet. Wenn Sie das Gerät fallen lassen, kann dies Schäden im Inneren verursachen. Behandeln Sie das Gerät stets vorsichtig.

NICHT mit Wasser in Berührung bringen – lassen Sie das Gerät nicht nass werden.

KEINE Flüssigkeiten auf das geöffnete Gerät platzieren.

NUR für den vorgesehenen Zweck verwenden.


NICHT von ungeübten/unbefugten Mitarbeiter bedienen lassen, es sei denn, dies erfolgt unter der Anleitung eines ausgebildeten HOFMAG-Therapeuten.




NICHT innerhalb einer Reichweite von 50 cm von Kreditkarten, Autoschlüsseln, Hörgeräten, Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten verwenden.




DISPLAYANZEIGE



Im Display des Hofmags werden immer die wichtigsten Informationen angezeigt.


Zentral werden die Intensität  **1** und die noch verbleibende Zeit  **2** angezeigt.

In der obersten Zeile können diverse Symbole erscheinen, die Auskunft über den Status des Hofmags geben:   / 

  / : Der grüne Haken zeigt an, dass die Loop richtig angeschlossen ist. Das Warndreieck weist daraufhin, dass keine Loop am Gerät angeschlossen ist. Entsprechend ist auch keine Therapie möglich.

: Dieses Symbol bedeutet, dass eine Karte eingesteckt ist.

: Dieses Symbol bedeutet, dass keine Karte eingesteckt ist.

: Der Schlüssel zeigt an, dass eine „Mastercard“ eingesteckt ist, mit der beliebig lange therapiert werden kann.

„10 / 100 Minutes“: Wenn eine Zeitkarte eingesteckt ist, wird Ihnen hier der Status Ihres Guthabens in Minuten angezeigt. Vor dem Schrägstrich wird das noch vorhandene Guthaben angezeigt, nach dem Schrägstrich das ursprünglich gekaufte Guthaben.

In der untersten Zeile finden Sie die folgenden Informationen: Name des Gerätes, Softwareversion und die Seriennummer. Diese Angaben werden im Fall eines Services benötigt.

FEHLERMELDUNGEN

Eine Auflistung aller möglichen Fehlermeldungen und deren Bedeutung:

Card Mode:

Das Hofmag kann nur mit einer Karte betrieben werden. Falls vorhanden, stecken Sie Ihre Karte links neben dem Display in den Kartenslot ein. Das Gerät kann durch die Freischaltkarte jederzeit wieder auf den freien Modus umgestellt werden.

No Loop:

Es befindet sich keine Loop in der Buchse. Bitte vergewissern Sie sich das die Loop ordnungsgemäß eingesteckt ist. Diese Fehlermeldung kann vor dem Start der Therapie erscheinen, wenn die Loop fehlt oder während der Therapie, wenn die Loop entfernt wird. In diesem Fall wird die Therapie sofort pausiert, bis wieder eine Loop angeschlossen ist.

Safety Stop:

Die Loop ist im laufenden Betrieb zu nahe an das Gerät gekommen. Durch das erzeugte Magnetfeld des Hofmags können elektrische Geräte geschädigt werden, so auch das Hofmag selbst. Zum Selbstschutz des Geräts ist ein Sensor integriert, der das Hofmag abschaltet, sollte die Loop zu nahekommen.

0 / 100 minutes:

Diese Fehlermeldung weist daraufhin, dass die von Ihnen gekauften Minuten (z.B. 100) aufgebraucht sind. Zur Weiterverwendung des Hofmags wenden Sie sich bitte an den zuständigen Betreiber.

BEHANDLUNGSLEITFADEN

Bevor Sie eine Behandlung eines Tieres beginnen, beachten Sie bitte folgende Grundsätze:

- Behandlungsschleufe nicht in der Nähe des Tieres auf den Boden legen, damit es nicht auf die Schleufe steigen kann oder sie in das Maul nimmt
- Die Behandlungsschleufe darf mit dem Tier direkt in Kontakt kommen
- Die Anwendung immer mit geringer Intensität starten, unterhalb der Schmerzgrenze des Tieres
- Für beste Ergebnisse werden 2 Anwendungen pro Tag empfohlen
- Zwischen 2 Anwendungen sollten mindestens 4 Stunden liegen
- Die maximale Anwendungsdauer pro behandelter Stelle sollte 30 Minuten betragen

Intensität einstellen:

- Die Intensität kann von 1 bis 13 reguliert werden.

Dauer:

- Die Grundeinstellung für die Anwendungsdauer beträgt 20 Minuten, die jederzeit unterbrochen werden kann.

Das Hofmag ist ein teures elektronisches Gerät, welches verantwortungsvoll benutzt werden muss.

Wenn das Hofmag nicht benützt wird, soll es mit dem Nummernschloss versperrt abgestellt werden, und nur befugte Personen sollen das Schloss öffnen können.

ZERTIFIKATIONEN

Für die Sicherheit der Patienten und Therapeuten wurde das Hofmag einer elektromagnetischen Kompatibilitäts Prüfung (EMC) nach folgenden Normen unterzogen:


1. Emmissions Test nach EU Norm EN 61000 - 6 - 3 : 2011.
Zertifikat Nummer: TRA - 042983 - 36 - 01A
2. Immunity Test nach EU-Norm EN 61000 - 6 - 1 : 2007.
Zertifikat Nummer: TRA - 042983 - 36 - 02A

TECHNISCHE DATEN

- **Die Technologie ist geschützt durch :** International Patent Application Number WO 2019/097254 A1
- **Impulsabgabe an Schlaufe:** 600 bis 1600 Amps. 1.0 Millisekunde Impulsweite, gedämpft durch 28 kHz Sinusschwingung.
- **Impulsrate:** 6 Impuls-Schwingungen pro Sekunde (6Hz).
- **Die Feldintensität ist über eine 13stufige Skala anpassbar.**

Einstellung	Ampere	Einstellung	Ampere	Einstellung	Ampere
1.	500	6.	1000	11.	1500
2.	600	7.	1100	12.	1550
3.	700	8.	1200	13.	1600
4.	800	9.	1300		
5.	900	10.	1400		

- **Magnetische Output Leistung:**

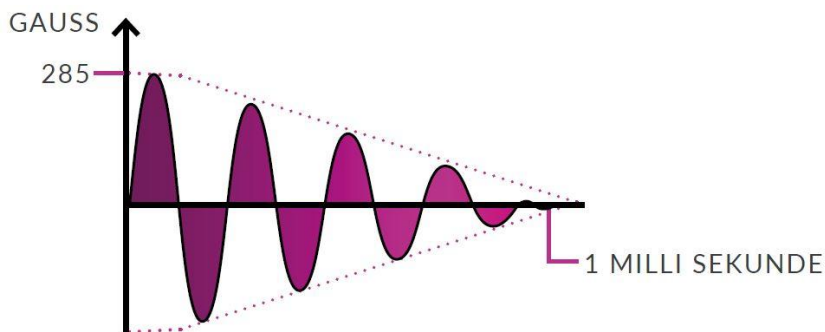

- (i) Jeder hörbare Tick ist 1 Impuls-Schwingung.
- (ii) Bei jeder Impuls-Schwingung oszilliert das Magnetische Feld eine Millisekunde (1/1000 Sekunde), beginnend mit 285 Gauss.

- **Netzanschluss:** 220Vac to 250Vac 1A 50Hz
- **Sicherung:** 3.15 Amp
- **Stromverbrauch:** 75W
- **Schutzgrad:** IP 54
- **Gewicht inkl. Schlaufe:** 16.0 Kg
- **Abmessungen:** 470mm x 355mm x 175mm



HOFMEIR MAGNETICS
UK LIMITED.

01672 837 138
info@hofmagtherapy.com
www.hofmagtherapy.com

Stefan Rantner
Sales Director

+43 (0) 664 4356934
srantner@hofmagtherapy.com
www.hofmagtherapy.com